

Порядок получения сухих пятен крови (DBS) на фильтр-картах для лабораторной диагностики редких метаболических заболеваний

Сухие пятна крови требуются для лабораторной диагностики редких метаболических заболеваний: дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ) и гипофосфатазия (ГФФ).

Получение сухих пятен крови:

1. Заполнить бланк на фильтр-карте шариковой ручкой. Обязательны для заполнения все поля: ФИО пациента, дата рождения, дата взятия крови, пол пациента, ФИО врача, ЛПУ и его адрес, контактные данные врача, а также лабораторные показатели для диагностики.
Бланк требуется заполнить до взятия крови для корректности принадлежности материала пациенту.
2. Обвести назначаемый тест и указать значения биохимических показателей, полученные при последнем анализе крови пациента.
3. Получить кровь пациента: венозную в пробирке с ЭДТА (сиреневая крышка) ИЛИ капиллярную, выполнив прокол пальца (у пациента младше 6 месяцев – пятки).
4. Нанести кровь на каждый из кружков фильтр-карты. При переносе из ЭДТА пробирки – не позднее, чем через 24 часа после взятия крови у пациента (важно при анализе на ДЛКЛ). Все кружки должны быть пропитаны кровью насквозь. Пятно крови должно полностью заполнять площадь кружка, а при невозможности полного заполнения занимать не менее 75% площади кружка.
5. Полностью высушить пятна крови (не менее 4-х часов), держа карту на чистой горизонтальной поверхности при комнатной температуре вдали от отопительных приборов без попадания прямого солнечного света. Пятна крови на фильтр-карте должны быть сухими, четкими, не смазанными.
6. Закрыть сверху высохшие пятна крови бумажным клапаном.
7. Образец крови на DBS-карте вложить в зип-пакет **с осушителем** и плотно закрыть. Далее рекомендуется хранить карты при температуре +2 – +8 °С или при комнатной температуре (не более 14 дней для анализа на ДЛКЛ) в темном месте.

Сухие пятна крови можно хранить при комнатной температуре (не выше 25 °С). Не допустимо хранение в условиях повышенной влажности (выше 75%), освещенности или вблизи отопительных приборов!

ОБРАЗЕЦ КРОВИ НЕ ДОЛЖЕН СОПРИКАСАТЬСЯ С ГРЯЗНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И ОБРАЗЦАМИ ДРУГИХ ПАЦИЕНТОВ.

Отправка сухих пятен крови:

Заблаговременно, до забора крови (не менее, чем за один день до желаемого дня приезда курьера), оставьте заявку на отправку сухих пятен крови через «горячую линию» Программы скрининга дефицита лизосомной кислой липазы и гипофосфатазии.

8 (800) 301-06-51

При возникновении вопросов по заполнению документов или технике получения сухих пятен крови, пожалуйста, обращайтесь на «горячую линию» Программы.